

Die erwartete Lebensdauer dieses Vierfußgehilfe bei einem Anwender beträgt 3 Jahre, sofern die hier erteilten Anleitungen befolgt werden. Ein Nichtbefolgen kann die Lebensdauer des Gerätes verkürzen.

## Einzelheiten der Gewährleistung

Ihr Markenprodukt von Drive kommt mit der Gesetzlich: zweijährigen Garantie ab Kaufdatum in Bezug auf mangelfreie Materialien und Verarbeitung.

Das Gerät wurde gewissenhaft hergestellt und geprüft. Es entspricht der derzeit gültigen Norm für Gehstöcke. Die Garantieleistung ist der Ausdruck unseres Vertrauens in die Materialien und Verarbeitung unserer Produkte und unsere Zusicherung an den Kunden.

Bei Eintritt eines Garantiefalles, werden wir nach Ihrer Wahl Ersatzteile liefern oder das Gerät austauschen.

Diese Garantie umfasst keinen Gerätefehler aufgrund Missbrauchs oder Fahrlässigkeit oder normaler Abnutzung. Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf kurzlebige Bauteile wie Gumpuffer, Rollen und Griffe, die der Abnutzung unterliegen und ausgetauscht werden müssen.

Sollten Sie Fragen haben oder die vollständigen Bedingungen der Garantieleistung anfordern wollen, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Drive Fachhändler auf.

**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

**Drive Medical GmbH & Co. KG**  
Leutkircher Str. 44 • D-88316 Isny/Allgäu  
Germany

Dokumentencode: WS016\_Hangtag (Ausz. 02/12)

# Vierfußgehilfe

## WS 016

## WS 016L




EU Authorized Representative  
Drive Medical LTD  
Ainley's Industrial Estate  
Elland, West Yorkshire  
United Kingdom HX5 9JP

**drive**  
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

[www.drivemedical.co.uk](http://www.drivemedical.co.uk)  
[www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)

## Über Ihren Vierfußgehilfe

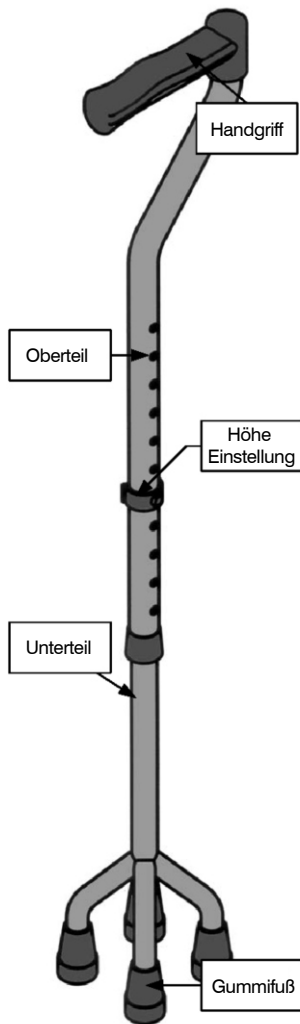

Ihr Vierfußgehilfe ist höhenverstellbar, leicht und geeignet für den Gebrauch drinnen und draußen.

Zur besseren Sicherheit ist das untere Ende mit vier Füßen und jeweils einem grauen Gummifuß ausgestattet.

Er ist für Verwender bis zu 127 kg (20 Stones) geeignet.

Zwei Modelle des vierfüßigen Gehstocks sind erhältlich:

Das Standardmodell (WS016) mit einer Höhe von 66 - 92cm (26" -36").

Das größere Modell (WS016L) mit einer Höhe von 79 - 104cm (31" - 41") und größerer Standfläche. (Abweichend zu Zeichnung).

## Einstellung der Höhe

Die ideale Einstellhöhe für Ihren Vierfußgehilfe ist die Entfernung zwischen dem Boden und Ihrem Handgelenk. Dadurch erhalten Sie eine aufrechte Position mit einer leichten Ellbogenbeuge.

### Für Modelle mit Steckklammern

Ziehen Sie die Steckklammer zum Entfernen heraus. Verschieben Sie das Griffrohr bis die gewünschte Höhe erreicht ist, dann die Steckklammer zur Sicherung wieder anbringen.

### Für Modelle mit Messing-Druckknöpfe

Die Messing-Druckknöpfe eindrücken. das Griffrohr bis zur gewünschten Höhe herausziehen oder einschieben bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Achten Sie darauf dass die Druckknöpfe in der nächstliegenden Bohrung eingerasten einrasten.

## Gebrauch, Sicherheit und Wartung

- ! Vermeiden Sie feuchte Böden, Eis und ähnliche Gefahren.
- ! Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie den Gehstock verwenden, über genügend Haftung verfügt.
- ! Falls möglich, Treppen normal besteigen, das Geländer zur Sicherheit umfassen. Verwenden Sie den vierfüßigen Gehstock auf derselben Stufe wie das vordere Bein.
- ! Vergewissern Sie sich, dass die Messing-Druckknöpfe immer eingerastet ist.
- ! Überprüfen Sie regelmäßig die Gummifüße auf Verschleiß. Ersatz-Gummifüße erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Drive Medical Händler.
- ! Prüfen Sie regelmäßig die Bohrungen zur Höhenverstellung auf Verschleiß.
- ! Während des Gebrauchs den vierfüßigen Gehstock immer am Handgriff halten.
- ! Überschreiten Sie das Maximalgewicht nicht.